


検体採取方法の説明書

検体の採取は口腔内細胞をとる方法で行います。
検体採取のステップは以下のように行って下さい。

検体採取は
ご自宅で
カンタンに
できます。




1 検体採取は、朝一番の歯みがき前に行ってください。サンプルを採る前に綺麗な水で2・3回うがいをしましょう。

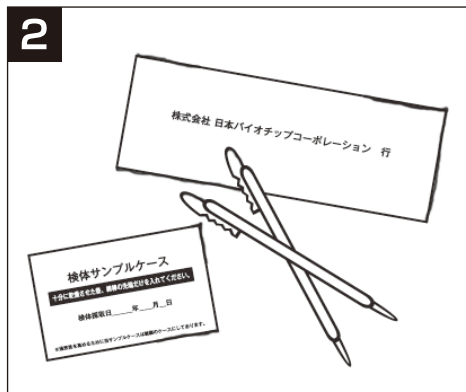


2 検査キットを開け中身を確認しましょう。**密封包装した綿棒2本、検体サンプルケース1つ、返信用の封筒が1通**が入っています。




3 検体サンプルケースに記載してありますお客様番号がお申込みIDと同じかご確認ください。検体採取日をご記入下さい。

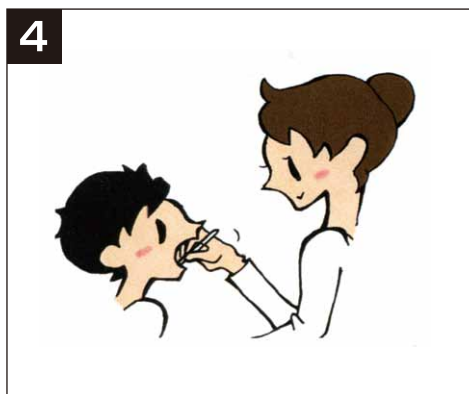

4 綿棒を1本取り出し、綿棒の鋸歯状部分を片側の頬に当て、歯磨きをするように20回ほどこすって下さい。力加減は頬の部分が餡をなめた時のように少し外側へ膨らむ程度までを基準とします。残りの1本で反対側の頬もこすります。

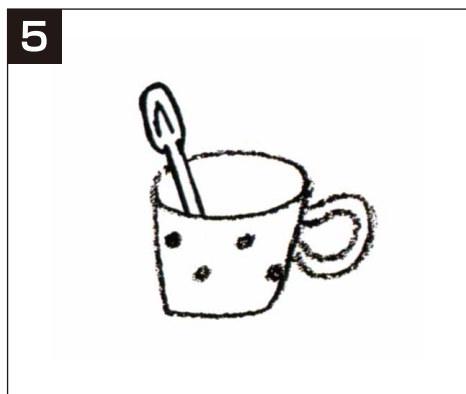

5 ステップ4で採取した2本の綿棒を自然乾燥させて下さい。(目安：2~3時間)この時、手や他のものが検体と接触しないよう注意して下さい。

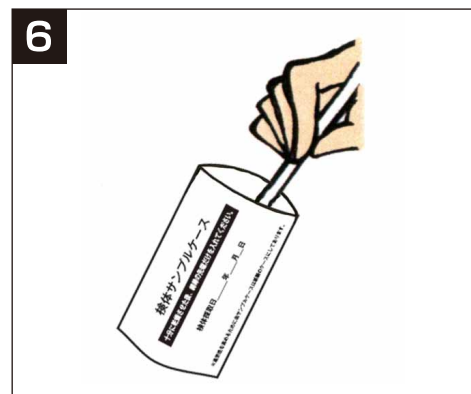

6 乾いた2本の綿棒の先を、あらかじめ準備した検体サンプルケースに入れ、細長いストローのお尻部分を軽く押し、綿棒の先がケースの中に落ちるようにして下さい。

7 検体サンプルケースは、セロテープで封を閉じてください。翌日までは返信用封筒に入れて返信して下さい。すぐに返信できない場合は冷蔵庫で保管して下さい。

8 鑑定結果報告書が届くまでお待ち下さい。
(約40~60日でお届けします。)



注意事項

1. サンプルを採る前に、必ずうがいをしてお口内を綺麗にしてください。(綿棒に食べカスなどが残っていると検査に影響を与える場合がございます。)
2. 検体採取日から10日以内に検査機関に到着している必要があります。(検体採取後は、速やかに返信用封筒にて検体をご郵送ください。)